

【尿器掛け 各社尿器対応表】

2015/3/31現在

尿器名/尿器掛け名	角型(片口)	両口	メッシュ (ハンチング)	SS丸	横置	回転式便器ラック
A	X	X	X	X	X	○※ <sub>2</sub>
B	○	○	○	○	X ※ <sub>1</sub>	○
C	○	○	○	○	○	○
D	○	○	○	○	○	○
E	○	○	○	○	○	○
F	○	○	○	X ※ <sub>4</sub>	X ※ <sub>1</sub>	○
G	○	○	○	X ※ <sub>4</sub>	X ※ <sub>1</sub>	○
H	○	○	○	○	○	○
I	○ ※ <sub>3</sub>	○ ※ <sub>3</sub>	○ ※ <sub>3</sub>	○ ※ <sub>3</sub>	○ ※ <sub>3</sub>	○

記号解説：『○』収納可能(良好)、『X』収納不可

尿器名 A：コンビ製『安楽尿器(男性用)』(女性用は未調査だが、全てに於いて収納は不可と思われる)

B：ピジョン製『ハビナス尿器(透明タイプ)(男性用)』(女性用も同結果と思われる)

C：アロン化成製『安寿尿器(女性用)』(男性用も同結果と思われる)

D：ピップ製『こぼれ一ぬ(男性用)』(女性用は全てに於いて不可と思われる)

E：アロン化成製『ユリフィット(男性用)』(女性用も同結果と思われる)

F：浅井商事製『DIA透明尿器 男性用』(大型も同じ)

G：浅井商事製『DIA透明尿器 女性用』

H：浅井商事製『SA透明尿器 男性用』

I：浅井商事製『SA透明尿器 女性用』

※<sub>1</sub> 収納はほぼ可能だが、首部が側面スリットにかかり少し底が浮いてしまうので、“X”との表示になった

※<sub>2</sub> レシーバーとタンクの両方を収納することが可能(レシーバーは、側面に掛けることも可能)だが、本来の使用方法とは違う為、参考として下さい

※<sub>3</sub> 本体に収納は可能だが、カバーには収納不可(縦型も同じ)

※<sub>4</sub> ほんの1部のみきついただけなので、少し無理をすれば入るが、使い勝手を考えると使用は不可